

STERIMAR™ ES MUY FÁCIL DE USAR



Antes de usar, quita la tapa protectora y realiza 1 o 2 disparos al aire para abrir la válvula.



Introduce suavemente la **boquilla en la fosa nasal** y **presiona el aplicador** para liberar la pulverización. Repite el mismo procedimiento en la otra fosa nasal.



Una vez terminado el proceso, quita la boquilla del envase y **lávala con agua y jabón**.



En el caso de usar **STERIMAR™ Bebé**, **recuesta al bebé** en posición lateral o siéntalo con la cabeza ligeramente inclinada a un lado.



SÍGUENOS EN:  @SterimarES  Sterimar España

Y EN NUESTRA WEB STERIMAR.ES




STERIMAR™

¡Y A RESPIRAR!